



CASADA
healthcare



< relaxmyway



HILTON II



CASADATM
healthcare

since
2000

< relaxmyway

Seit der Gründung im Jahr 2000 steht der Name CASADA für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und Fitness.

Heute sind CASADA-Geräte weltweit erhältlich. Kontinuierliche Weiterentwicklung, unverwechselbares Design und die strikte Ausrichtung auf eine Verbesserung der Lebensqualität zeichnen die CASADA-Produkte ebenso aus, wie die zuverlässige und hervorragende Qualität.

Wir Gratulieren

Mit dem Kauf dieses Massagesessels haben Sie Gesundheitsbewusstsein bewiesen.

Damit Sie auf lange Zeit die Vorzüge dieses Sessels nutzen können, möchten wir Sie bitten, die Sicherheitshinweise aufmerksam zu lesen und zu beachten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem persönlichen Hilton II.

Inhaltsverzeichnis

4	Sicherheitshinweise
5	Kontraindikationen
6	Aufbau
8	Ausstattung
9	Inbetriebnahme
9	Lagerung / Pflege
10	Fernbedienung
13	Display
14	Besonderheiten
16	Störungssuche
16	Technische Daten
17	EU – Konformitätserklärung
17	Gewährleistungsbestimmungen

Sicherheitshinweise



Bevor Sie Ihren Massagesessel in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte sorgfältig die folgenden Hinweise, um die einwandfreie Funktion und optimale Wirkungsweise zu gewährleisten. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgsam auf!

- Der Massagesessel entspricht den anerkannten Grundsätzen der Technik und den aktuellen Sicherheitsbestimmungen.
- Der Massagesessel ist wartungsfrei. Evtl. anfallende Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachkraft durchgeführt werden.
- Unsachgemäßer Gebrauch sowie unautorisierte Reparaturen sind aus Sicherheitsgründen untersagt und führen zum Garantieverlust.
- Um Unfälle zu vermeiden, greifen Sie nicht mit den Fingern zwischen die Massagerollen.
- Berühren Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen.
- Vermeiden Sie Kontakt des Massagesessels mit Wasser, hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie den Massagesessel nicht in einer Umgebung mit zu hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. in einem Badezimmer.
- Bitte verwenden Sie den Massagesessel nicht, wenn er eingeeengt oder an einem Platz steht an dem die Ventilatoren abgedeckt sind und eine Frischluftzufuhr nicht gewährleistet ist.
- Um die Gefahr eines Kurzschlusses zu vermeiden, trennen Sie bei längerer Nichtbenutzung den Massagesessel von der Stromversorgung.
- Benutzen Sie keine beschädigten Stecker, Kabel oder losen Fassungen.
- Beschädigte Stecker/Kabel müssen vom Hersteller, einem Service-Vertreter oder von qualifiziertem Personal ersetzt werden.
- Bei Funktionsstörung trennen Sie bitte sofort die Verbindung zur Stromzufuhr.
- Zweckentfremdung oder falsche Nutzung schließt Haftung für Schäden aus.
- Um eine übermäßige Strapazierung der Muskulatur und der Nerven zu vermeiden, sollten Sie die täglich empfohlene Massagedauer von 30 Minuten nicht überschreiten.
- Um Beschädigungen an Ihrem Massagesessel zu vermeiden, verwenden Sie niemals spitze oder scharfe Gegenstände.
- Um die Gefahr von Kurzschluss oder Brand zu vermindern, sollten Sie unbedingt zum Stecker passende Steckdosen verwenden und sicherstellen, dass der Stecker vollständig in der Steckdose eingesteckt ist.
- Nach der Anwendung und vor der Reinigung, trennen Sie Ihren Massagesessel unbedingt von der Stromzufuhr.
- Sollte es während der Anwendung zu einem unvorhergesehenem Stromausfall kommen, stellen Sie den Schalter bitte unverzüglich auf OFF und ziehen Sie den Stecker, um Beschädigungen an Ihrem Massagesessel zu vermeiden.
- Bei feuchten oder beschädigten elektrischen Kabeln dürfen Sie den Massagesessel nicht betreiben.
- Wenn Kinder, Menschen mit Behinderung oder gebrechliche Personen sich in der Nähe des Massagesessels aufhalten oder diesen benutzen, müssen Sie unbedingt beaufsichtigt werden.
- Benutzen Sie den Massagesessel nicht direkt nach Einnahme einer Mahlzeit oder unter Einfluss von Alkohol.
- Verwenden Sie das Produkt nur zu dem in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Bitte verwenden Sie nur Zubehör des Lieferanten.
- Bitte stehen, sitzen oder hüpfen sie nicht auf der Fußstütze, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Um Schäden und Selbstverletzungen zu vermeiden, versuchen Sie nicht auf Arm- oder Rückenlehne zu sitzen.
- Bitte halten Sie Ihren Massagesessel regelmäßig sauber und vermeiden Sie dabei das Einfallen von Fremdkörpern in die Ritzen des Massagesessels.
- Bitte vermeiden Sie direktes Ziehen am Stromkabel Ihres Massagesessels.
- Bitte stellen Sie bei der Verstellung von Fußstütze oder Rückenlehne sicher, dass darunter keine anderen Objekte befinden, insbesondere keine Kinder.
- Das Produkt ist ausschließlich für den Heimgebrauch vorgesehen.
- Bei Beschädigung des flexiblen Stromkabels muss ein dafür vorgesehenes flexibles Kabel verwendet werden oder vom Hersteller oder dessen Wartungsstelle ein dafür vorgesehenes flexibles Kabel zum Austausch erworben werden.


Kontraindikationen

Falls Sie nicht sicher sind, ob Sie den Massagesessel benutzen dürfen, konsultieren Sie in jedem Fall Ihren Arzt.

- Massagen während der Schwangerschaft oder bei einer/mehreren der folgenden Beschwerden im Massagebereich sind untersagt: Frische Verletzungen, thrombotische Erkrankungen, Entzündungen und Schwellungen aller Art, sowie Krebs. Während der Behandlung von Gebrechen und Leiden ist vor einer Massage die Absprache mit Ihrem Arzt zu empfehlen.
- Personen mit Beeinträchtigung von Körper, Wahrnehmung oder Psyche oder Personen mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis – ist die Benutzung des Massagesessels nur unter Aufsicht und Anleitung durch die für Ihre Sicherheit verantwortliche Personen zulässig.
- Um Unannehmlichkeiten oder Gefährdungen durch die Benutzung des Massagesessels zu vermeiden, bitten wir die folgenden Personen vor der Benutzung um Konsultation eines Arztes:
 - Ruhebedürftige Personen
 - In medizinischer Behandlung befindliche Personen
 - Rückenpatienten, Personen mit Wirbelsäulenproblemen oder -verbiegungen
 - Personen mit Herzschrittmachern
- Bei Schmerzempfindungen während der Massage beenden Sie die Anwendung bitte unverzüglich.
- Bei Verletzungen während der Anwendung begeben Sie sich bitte unverzüglich in ärztliche Behandlung.
- Massieren Sie bitte keine geröteten, geschwollenen oder entzündeten Hautstellen.
- Dieser Massagesessel dient nur Ihrer heimischen Wellness-Massage, ist kein medizinisches Massageprodukt und kann daher eine medizinische Fachbehandlung nicht ersetzen.
- Wir empfehlen Ihnen eine tägliche Anwendung durch den Massagesessels von 30 Minuten. An gleicher Körperstelle sollten Sie höchstens 15 Minuten massieren, da ansonsten eine entgegengesetzte Wirkung auf Grund übermäßiger Massage eintreten kann.
- Diese Produkt ist für Kinder unter 12 Jahren nicht geeignet.
- Kinder sind zu beaufsichtigen. Stellen Sie sicher, dass Kinder den Massagesessel nicht zum Spielen benutzen.

Aufbau


I. ÖFFNEN DER VERPACKUNG UND ENTNAHME DES ZUBEHÖRS

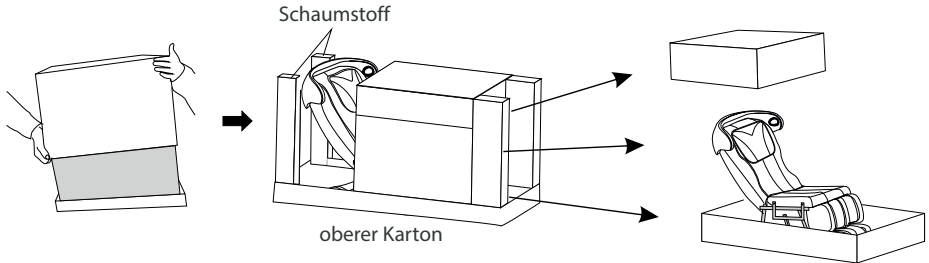

1. Öffnen Sie das Verpackungsklebeband der Außenverpackung des Massagesessels und heben Sie diese nach oben ab.
2. Entfernen Sie zunächst den oberen Karton (Seitenteile) und dann den Schaumstoff zu beiden Seiten des Massagesessels.
3. Entnehmen Sie die Zubehörverpackung.
4. Lieferumfang der Zubehörverpackung: Bedienungsanleitung, Stromkabel, Kreuzschraubenzieher, Fernbedienung, 2 Seitenteile, 2 Schulterairbags, Inbusschlüssel, Schrauben.

II. INSTALLATION DER SEITENTEILE

Luftschlauchanschluss

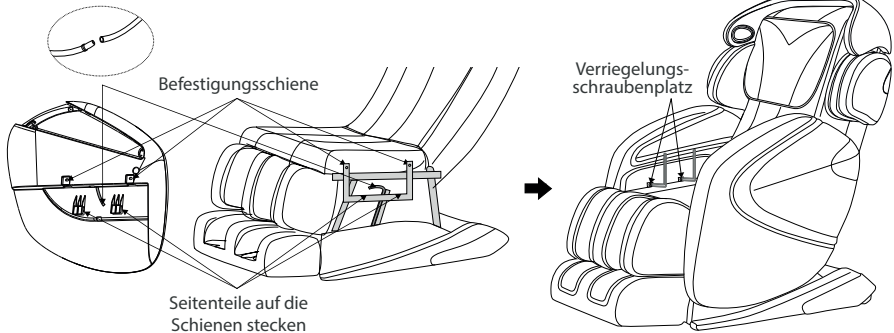


1. Öffnen Sie den Karton der Seitenteile und entnehmen Sie diese.
2. Verbinden Sie zunächst den Luftschlauch am Seitenteil mit dem Luftschlauch seitlich am Sitzteil. Stellen Sie sicher, dass beide Enden der Schläuche komplett auf das Verbindungstück gesteckt sind. Verbinden Sie das andere Seitenteil genauso.
3. Positionieren Sie das Seitenteil mit den zwei Öffnungen auf der Unterseite bündig über die zwei Befestigungsschienen und stecken Sie das Seitenteil auf die Schienen. Auf der Innenseite des Seitenteils finden Sie jeweils rechts und links zwei kleine Öffnungen mit einem Reißverschluss. Durch diese befestigen Sie die Seitenteile mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben und dem Inbusschlüssel.

HINWEIS: Achten Sie beim Befestigen der Schrauben darauf, dass die jeweiligen Seitenteile bündig mit der Arretierungsvorrichtung sind.

Aufbau


III. MONTAGE DES SCHULTER-AIRBAGS

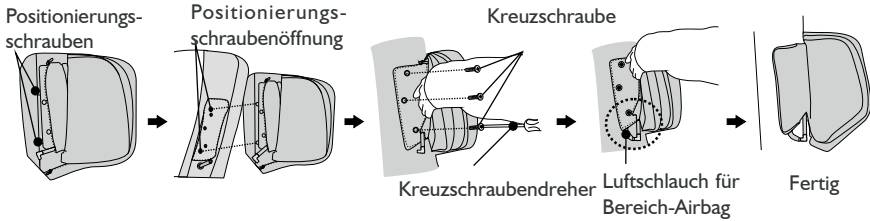

1. Nehmen Sie den seitlichen Schulterairbag, welcher jeweils rechts und links über den Seitenteilen am Rückenteil befestigt wird zur Hand. Hierfür öffnen Sie den Reißverschluss komplett. Auf der Rückseite des Schulterairbags befinden sich zwei Positionierungsschrauben. Stecken Sie den Schulterairbag in die zwei vorgegebenen Löcher, welche auf den Rückenteil sichtbar sind.
2. Schrauben Sie den Schulterairbag mit drei Kreuzschrauben fest. (Schrauben und Kreuzdreher im Lieferumfang enthalten)
3. Verbinden Sie den Luftschlauch des Seitenairbags mit dem Luftschlauch am Rückenteil.
4. Überprüfen Sie ob der Seitenairbag fest installiert ist und die Luftschläuche korrekt verbunden wurden. Anschließend ziehen Sie den Reißverschluss zu.
5. Verfahren Sie ebenso mit der anderen Seite.


IV. ÜBERPRÜFEN SIE DEN GESAMTEN MASSAGESESSL UND GLÄTTEN SIE DEN ÜBERZUG

V. AUFSTELLEN DES MASSAGESESSLS

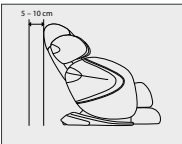

1. Heben Sie den gesamten Massageessel aus der Bodenverpackung und positionieren Sie ihn, wie im folgenden Absatz genauer beschrieben, im Raum.
2. Bitte beachten Sie, dass zwischen Rückenlehne und Wand, sowie Fußteil und eventuellen Möbeln, ein 5 – 10 cm Abstand eingehalten wird. Andernfalls können Rückenlehne und Fußteil nicht vollständig ausgefahren werden.

VI. BEWEGEN DES MASSAGESESSLS

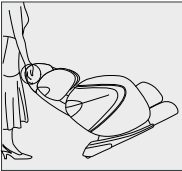


1. Halten Sie die Rückenlehne wie links abgebildet mit beiden Händen fest und neigen Sie den Massageessel etwa 45° nach hinten. Schieben Sie den Massageessel auf den Transportrollen vorsichtig vor oder zurück und setzen Sie ihn an geeigneter Stelle ab.

Hinweis:



- Bewegen Sie den Massageessel nicht während sich Personen darauf befinden.
- Sollte durch Bewegung des Massageessels der Boden darunter beschädigt werden können, unterlassen Sie bitte das Bewegen.
- Halten Sie den Massageessel fest im Griff, um Herabfallen zu vermeiden.

VII. MUSIKFUNKTION (ANLAGE)

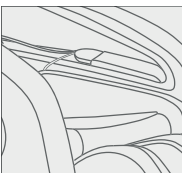


- Um Ihre persönliche Musik abzuspielen, stecken Sie das im Massageessel eingefasste 3,5 Klinkenkabel (Musikkabel) in den Kopfhörerausgang Ihres Mediaplayeres.

Ausstattung

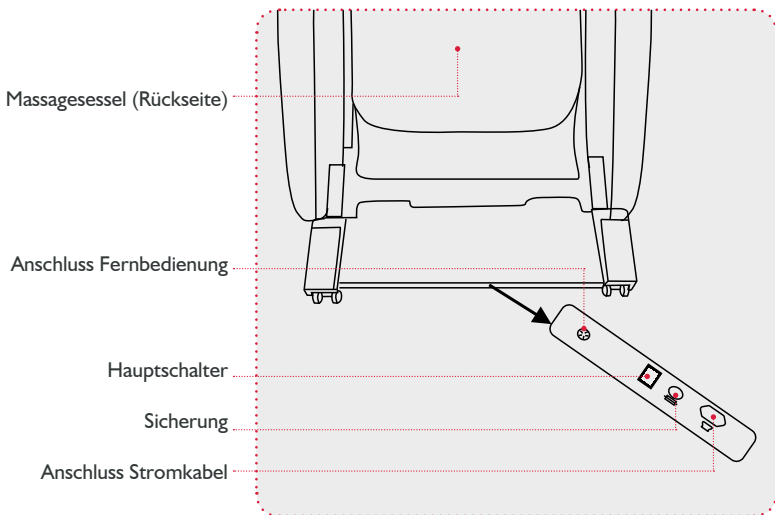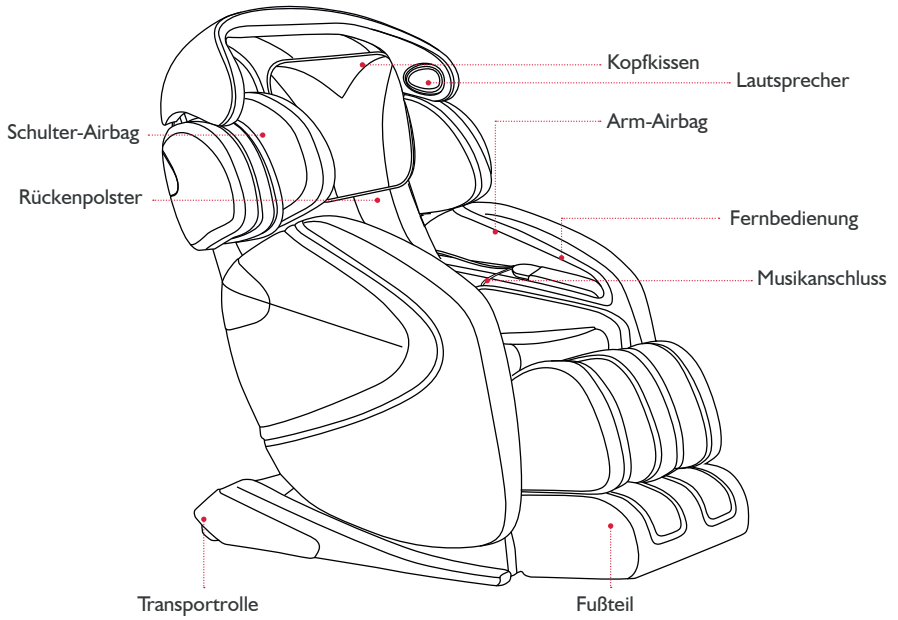

Inbetriebnahme

Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme den Netzstecker. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Sessel (A) und stecken Sie anschließend den Netzstecker in die Steckdose. Schalten Sie nun den Sessel ein, indem Sie den Schalter auf „I“ stellen (B).

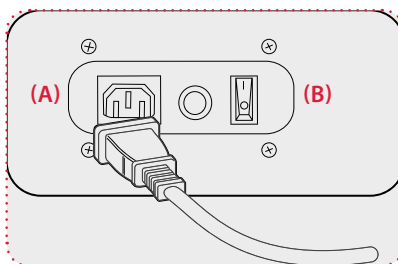

Lagerung / Pflege

Durch regelmäßige Pflege erhöhen Sie die Lebensdauer Ihres Hilton II und sorgen gleichzeitig für allzeit sicheren Betrieb.

1. Empfohlene Lagerung: Trocken, staubfrei. Bitte Kabel aufwickeln.
2. Halten Sie Flüssigkeiten oder offene Flammen vom Massagesessel fern.
3. Reinigen Sie den Massagesessel.
4. Trennen Sie den Massagesessel vom Stromnetz, wenn er nicht im Gebrauch ist.
5. Positionieren Sie den Massagesessel nicht neben einer Heizung oder offenen Flamme, setzen Sie ihn nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.

Fernbedienung



- 1 – Ein-/Ausschalten
- 2 – Zero Gravity Position
- 3 – Automatikprogramme (Deep Tissue, Stretching, Relax, Rejuvenate, Off)
- 4 – Yoga
- 5 – S-Line
- 6 – An/Aus Wärmefunktion
- 7 – Steuerung der Punktmassage
- 8 – Luftdruck Intensität
- 9 – Steuerung der Position von Rückenlehne und Fußteil
- 10 – Fußrollenfunktion
- 11 – Display
- 12 – Manuelle Massage
- 13 – Massage-Geschwindigkeit
- 14 – Massagebereich auswählen
- 15 – Punktmassage
- 16 – Pause
- 17 – Bereich Luftdruckmassage
- 18 – Abstand Massagerollen

FUNKTIONSBEREICHE



Auswahltaste für die manuelle Massage, Ablauf wie folgt:
Kneading → Tapping → Dual → Shiatsu → Rolling → Off



Auswahltaste für die Luftdruck-Massage: Bei jedem Drücken dieser Taste erfolgt die Auswahl des Airbag-Massagebereichs, durch Blinken erfolgt Anzeige auf dem Bildschirm. Bei kontinuierlichem Drücken erfolgt kombinierte Massage verschiedener Bereiche.

Füße/Waden → Arme → Schultern → Füße/Waden/Arme → Füße/Waden/Arme/Schultern




Einstelltaste der Luftdruck-Intensität, in 3 Stufen einstellbar.



Auswahltaste des Massagebereichs, Ablauf wie folgt:
Nacken → oberer Rücken → unterer Rücken → Gesäß → kompletter Rücken → unterer Rücken & Gesäß → kompletter Rücken & Gesäß


Fernbedienung

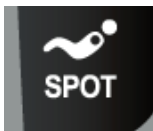

Bei dieser Funktion massieren die Massageköpfe auf einer Stelle.



Im Programm Punktmassage kann durch Drücken dieser Taste die Auf- und Abwärtsposition der Massageköpfe eingestellt werden.

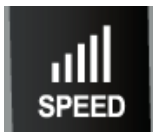

Einstelltaste für die Massage-Geschwindigkeit, in 3 Stufen einstellbar.



Durch Drücken dieser Taste können die Abstände zwischen den 2 Massageköpfen eingestellt werden (eng, mittel und weit).
Hinweis: Nicht im Kneading-Modus möglich.

2. BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG



Durch Drücken des Powerknopfes wird der Massagesessel eingeschaltet und durch nochmaliges Drücken werden sämtliche Funktionen des Massagesessels ausgeschaltet.



Durch Drücken dieser Taste wird das Programm unterbrochen und durch nochmaliges Drücken wird das Programm fortgesetzt.



AUTOMATIKPROGRAMME

1. Deep Tissue

Konzentriert sich auf die tiefliegenden Schichten Ihres Muskelgewebes, um Verkrampfungen und Muskelschmerzen entgegenzuwirken.

2. Rejuvenate / Regenerierend

Durchdringende Massagetechniken (Druck & Kneten) entlasten Ihre Gelenke. Ideale Massage zur Stärkung und Entlastung Ihres Rückens und Ihrer Beine.

3. Relax

Einfach zurücklehnen, abschalten, ausruhen, lockern und erholen.

4. Stretching / Dehnung

Dieses speziell entwickelte Dehnungsmassageprogramm erinnert sicher auch Sie an das angenehme Gefühl des Gedehnt-Werdens. Eine sanfte Massagekombination abwechslungsreicher Dehntechniken verwöhnt Ihren gestressten Körper.

Fernbedienung

FUNKTIONSBEREICH POSITIONSEINSTELLUNG



- 1x Drücken – Der Massagesessel fährt auf Position ZERO-G 1.
- 2x Drücken – Der Massagesessel fährt auf Position ZERO-G 2.
- 3x Drücken – Der Massagesessel fährt auf Position ZERO-G 3.
- 4x Drücken – Der Massagesessel kehrt in die Ausgangsposition zurück.



Mit diesen Tasten wird die Position der Rückenlehne gesteuert. Hinweis: Das Fußteil bewegt sich automatisch mit in die entsprechende Liegeposition.



Mit diesen Tasten wird die Position des Fußteils gesteuert.



Gezielte Dehnungsmassage aktiviert Ihren Körper und hat eine belebende Wirkung auf den gesamten Organismus.



Bei diesem Automatikprogramm massieren besonders körpernahe Massageköpfe den gesamten Rücken bis hin zum Gesäß. Die S-förmige Mechanik ist der natürlichen Anatomie der Wirbelsäule nachempfunden, dementsprechend können alle Muskelpartien entlang der Wirbelkörper massiert werden.

FUNKTIONSBEREICH MANUELL



Start oder Stopp der Wärmefunktion im Rückenbereich.



Start oder Stopp der Fußrollenmassage.




1. Drücken Sie den Powerknopf der Fernbedienung, um den Sessel auszuschalten.

2. Stellen Sie den Hauptschalter des Massagesessels auf OFF und ziehen Sie den Stecker.

*Um Beschädigungen am Kabel zu vermeiden, ziehen und drehen Sie dieses bitte nicht!

3. FUNKTIONSBEREICH DES ANZEIGEBILDSCHIRMS

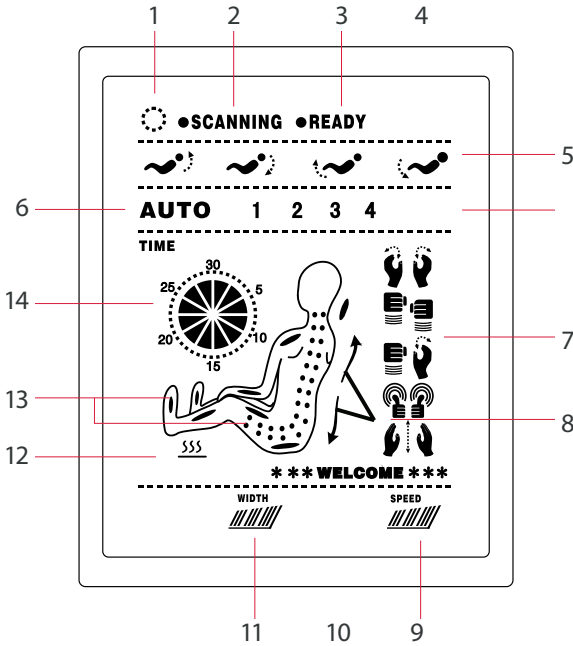

1. Massagesessel an Stromquelle angeschlossen, derzeit in Betrieb
2. Massagesessel scannt Körper
3. Körperscan beendet, Massage kann beginnen
4. Pausenfunktion des Massagesessels
5. Gegenwärtige Positionseinstellung des Massagesessels
6. Gegenwärtig automatisches Massageprogramm des Massagesessels
7. Gegenwärtig manuelles Massageprogramm des Massagesessels
8. Status von Auf- und Abwärtsbewegung der Massagerollen des Massagesessels
9. Geschwindigkeitseinstellung des Massagesessels, dreistufig einstellbar
10. Stärkeneinstellung bei der Airbag-Massagefunktion des Massagesessels, dreistufig einstellbar
11. Breiteneinstellung zwischen den Massagerollen des Massagesessels, dreistufig einstellbar
12. Wärmefunktion
13. Bereichsanzeigestatus der Airbag-Massagefunktion
14. Anzeige der Dauer der Massagefunktion des Massagesessels

Besonderheiten



ROLLING

Das Rolling ist eine angenehme Abwechslung zwischen Spannung und Lösung der Muskulatur und wirkt daher besonders beruhigend und entspannend. Diese Technik wird häufig zum Abschluss der Massage, zur Entspannung der Muskulatur und zur Erholung angewandt.



KNEADING

Haut und Muskulatur werden entweder zwischen Daumen und Zeigefinger oder mit beiden Händen gefasst und geknetet. Diese Massagetechnik wird vor allem zum Lösen von Verspannungen verwendet.



AIR COMPRESSION

Auf- und abschwellende Airbags bewirken eine pumpende Bewegung, die natürliche Muskelreflexe erzeugt. Besonders wohltuend auch im Waden- und Fußbereich.



HEATING

Eine tiefenwirksame und wärmeausstrahlende Funktion bei der man perfekt entspannen kann. Durch die tief reichende Wirkung ist diese Funktion besonders wohltuend bei Muskelverspannungen.



TAPPING

Beim TAPPING werden mit der Handkante, der flachen Hand oder der Faust kurze klopfende Bewegungen ausgeführt. Dies fördert die Durchblutung der Haut und erweicht die angespannte Muskulatur. Wird das Tapping auf Höhe der Lunge durchgeführt verbessert dies die Schleimlösung in der Lunge.



DUAL ACTION

Hier werden die Techniken des Knetens und Klopfens kombiniert, um gleichzeitig Verspannungen zu lösen und die Durchblutung zu fördern.



SOLE ROLLER

Der Fußroller belebt und stimuliert die Nervenenden, somit bestimmte Körperorgane und lockert die Muskulatur.



L-SHAPE

Eine tief greifende Ganzkörper-Massage vom Nacken bis hinunter zum Gesäß.



ZERO SPACE

Für die Liegepositionen fährt der Sessel nach vorne und benötigt dadurch einen Wandabstand von nur 5 cm. Platzsparend und komfortabel!



S-LINE

Bei diesem Automatikprogramm massieren besonders körpernahe Massageköpfe den gesamten Rücken bis hin zum Gesäß. Die S-förmige Mechanik ist der natürlichen Anatomie der Wirbelsäule nachempfunden.



ZERO GRAVITY

Sie begeben Sie sich in die für Astronauten entwickelte Position – „Schwerelos-Gefühl“.



2D MASSAGE

Der 2D Massagemechanismus gestattet dem Massagesessel die Vermessung Ihres Rückens und ist auch in der Lage die genaue Position der Abschnitte Ihrer Wirbelsäule zu erkennen.

Besonderheiten



AUTOMATIC

6 speziell entwickelte Ganzkörper-Automatikprogramme bieten eine breite Palette unterschiedlicher Massagetechniken an. Hierbei lässt sich wahlweise die Wärme-/Heating Funktion zuschalten.



BACK AREA

Ein individuell auf jede Größe anwendbarer Massagebereich.



ADJUSTABLE FOOTREST

Die Fußstütze kann bis zu 15 cm verlängert werden und passt sich somit jeder Körpergröße individuell an.



RECLINING POSITION

Die Verstellbarkeit von Rückenlehne und Fußstütze trägt zur persönlichen Wohlfühlposition des Körpers bei.



AIR INTENSITY

Die Intensivität der Airbag-Massage ist einstellbar.



AIR AREA

Airbag-Massage für 3 Bereiche (ganzer Körper, Arme und Beine, unterer Körper).



SPOT

Die Massageköpfe können punktuell massieren.



YOGA

Gezielte Dehnungsmassage aktiviert Ihren Körper und hat eine belebende Wirkung auf den gesamten Organismus.



SPEED

Die Massage-Geschwindigkeit ist einstellbar.



WIDTH

Der Abstand zwischen den beiden Massageköpfen ist einstellbar (eng, mittel und weit).



MUSIC

Zusätzlich entspannen und genießen mit der Musikfunktion.



AKKUPRESSURPUNKTE

Acht entscheidende Akkupressurpunkte (an den Oberschenkeln, Waden und Knöcheln) werden massiert.



SHIATSU

Shiatsu (Fingerdruck) ist eine in Japan entwickelte Form der Körpertherapie. Die Massagetechnik besteht aus sanften, rhythmischen, tiefer wirkenden Dehnungen und Rotationen. Shiatsu hat das Ziel einzelne Punkte am Körper zu stimulieren und die Muskulatur zu mobilisieren.

Störungssuche

Im außergewöhnlichen Fall einer Störung, beenden Sie bitte zur Vermeidung von Unfällen die Benutzung und ziehen Sie den Stecker. Falls die folgenden Maßnahmen keine Abhilfe bringen, kontaktieren Sie bitte das Kundendienstcenter.

Störung	Behebung
Keine Bedienung des Massagesessels trotz eingestecktem Stecker möglich.	<ol style="list-style-type: none">1. Überprüfen Sie ob das Stromkabel am Massagesessel, sowie die Anschlussvorrichtung der Fernbedienung korrekt eingesteckt sind.2. Überprüfung, ob der Schalter des Massagesessels auf „ON“ gestellt ist.
Der Massagesessel reagiert nicht auf die Fernbedienung.	<ol style="list-style-type: none">1. Überprüfen Sie ob das Stromkabel am Massagesessel, sowie die Anschlussvorrichtung der Fernbedienung korrekt eingesteckt sind.2. Der Massagesessel verfügt über eine automatische Abschaltung bei Überhitzung. Trennen Sie den Massagesessel von der Stromquelle und lassen ihn 30 bis 50 Minuten auskühlen.
Massagesessel und Fernbedienung lassen sich nicht bedienen.	Nach Ablauf des Massageprogramms schaltet der Massagesessel automatisch in den Stand-by-Modus. Bitte betätigen Sie die Power-Taste erneut um den Massagesessel zu aktivieren.

Technische Daten

Maße stehend: (L) 135 x (B) 79 x (H) 121,8 cm

Maße liegend: (L) 171 x (B) 79 x (H) 74 cm

Gewicht: 94 kg

Spannung: 220 V ~ 50/60 Hz

Nennleistung: max. 230 W

Zertifikate:



EU – Konformitätserklärung

Entspricht den europäischen Richtlinien EMC 2014/30/EU und LVD 2014/35/EU.

Gewährleistungsbestimmungen

Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit. Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen. Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile wie z.B. Stoffabdeckungen. Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Gewährleistungszeit.

Der Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, dieser z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist. Die Gewährleistung vom Händler beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Gewährleistung übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und/oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstanden sind.

Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Hersteller heraus, dass das Gewährleistungsverlangen einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com



Copyright Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von CASADA International GmbH und dürfen ohne ausdrückliche Bestätigung nicht weiterverwendet werden.

Copyright © 2016 CASADA International GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.