



▼ relax in style

KENNEDY IV

BEDIENUNGSANLEITUNG | *MANUAL*



< relax in style

Seit der Gründung im Jahr 2000 steht der Name CASADA für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und Fitness.

Heute sind CASADA-Produkte in weltweit 37 Ländern erhältlich. Kontinuierliche Weiterentwicklung, unverwechselbares Design und die strikte Ausrichtung auf eine Verbesserung der Lebensqualität zeichnen die CASADA-Produkte ebenso aus, wie die zuverlässige und hervorragende Qualität.

WIR GRATULIEREN

Mit dem Kauf dieses Massagesessels haben Sie Gesundheitsbewusstsein bewiesen.

Damit Sie auf lange Zeit die Vorzüge dieses Sessels genießen können, möchten wir Sie bitten, die Sicherheitshinweise aufmerksam zu lesen und zu beachten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem persönlichen Kennedy IV.

INHALTSVERZEICHNIS

5	Die Massage
6	Sicherheitshinweise
7	Installation
7	Aufbau
14	Inbetriebnahme
15	Technische Daten
15	EU - Konformitätserklärung
16	Ausstattung/Funktionen
18	Fernbedienung
22	Massagetechniken
24	Störungssuche
24	Pflegehinweise
24	Lagerung
25	Gewährleistungsbestimmungen
50	Notizen



Jeder kennt die wohltuende Lockerung verspannter Muskeln durch eine Massage. Die Vorgänge innerhalb der Muskeln, Blutgefäße und Nervenstränge lassen sich einleuchtend erklären.

Im Körper existieren zwei Kreislaufsysteme. Der Blutkreislauf, ausgehend vom Herzen, versorgt das Gehirn, die Organe und die Muskulatur mit Nährstoffen und dem lebenswichtigen Sauerstoff, während das Lymphsystem dafür sorgt, dass Stoffwechselprodukte, Schlacken und Gifte aus dem Körper ausgespült werden können.

Wird unser Immunsystem durch Infektionen und Viren beansprucht, tastet der Arzt zunächst die Lymphknoten ab, da diese Abwehrzellen produzieren und auf diese Belastung durch Anschwellen reagieren. Jede Massage regt dieses System an und fördert so den Abtransport schädlicher Stoffe und die Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen.

SICHERHEITSHINWEISE



Bevor Sie Ihren Massagesessel in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte sorgfältig die folgenden Hinweise, um die einwandfreie Funktion und optimale Wirkungsweise zu gewährleisten. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgsam auf!


- Der Massagesessel entspricht den anerkannten Grundsätzen der Technik und den aktuellen Sicherheitsbestimmungen.
- Der Massagesessel ist wartungsfrei. Evtl. anfallende Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachkraft durchgeführt werden.
- Unsachgemäßer Gebrauch sowie unautorisierte Reparaturen sind aus Sicherheitsgründen untersagt und führen zum Garantieverlust.
- Um Unfälle zu vermeiden, greifen Sie nicht mit den Fingern zwischen die Massagerollen.
- Berühren Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen.
- Vermeiden Sie Kontakt des Massagesessels mit Wasser, hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie den Massagesessel nicht in einer Umgebung mit zu hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. in einem Badezimmer.
- Bitte verwenden Sie den Massagesessel nicht, wenn er eingeeengt oder an einem Platz steht an dem die Ventilatoren abgedeckt sind und eine Frischluftzufuhr nicht gewährleistet ist.
- Um die Gefahr eines Kurzschlusses zu vermeiden, trennen Sie bei längerer Nichtbenutzung den Massagesessel von der Stromverbindung.
- Benutzen Sie keine beschädigten Stecker, Kabel oder losen Fassungen.
- Beschädigte Stecker/Kabel müssen vom Hersteller, einem Service-Vertreter oder von qualifiziertem Personal ersetzt werden.
- Bei Funktionsstörung trennen Sie bitte sofort die Verbindung zur Stromzufuhr.
- Zweckentfremdung oder falsche Nutzung schließt Haftung für Schäden aus.
- Um eine übermäßige Strapazierung der Muskulatur und der Nerven zu vermeiden, sollten Sie die täglich empfohlene Massagedauer von 30 Minuten nicht überschreiten.
- Um Beschädigungen an Ihrem Massagesessel zu vermeiden, verwenden Sie niemals spitze oder scharfe Gegenstände.
- Um die Gefahr von Kurzschluss oder Brand zu vermindern, sollten Sie unbedingt zum Stecker passende Steckdosen verwenden und sicherstellen, dass der Stecker vollständig in der Steckdose eingesteckt ist.
- Nach der Anwendung und vor der Reinigung, trennen Sie Ihren Massagesessel unbedingt von der Stromzufuhr.
- Sollte es während der Anwendung zu einem unvorhergesehenem Stromausfall kommen, stellen Sie den Schalter bitte unverzüglich auf OFF und ziehen Sie den Stecker, um Beschädigungen an Ihrem Massagesessel zu vermeiden.
- Bei feuchten oder beschädigten elektrischen Kabeln dürfen Sie den Massagesessel nicht betreiben.
- Wenn Kinder, Menschen mit Behinderung oder gebrechliche Personen sich in der Nähe des Massagesessels aufhalten oder diesen benutzen, müssen Sie unbedingt beaufsichtigt werden.
- Benutzen Sie den Massagesessel nicht, direkt nach Einnahme einer Mahlzeit oder unter Einfluss von Alkohol.
- Verwenden Sie das Produkt nur zu dem in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Bitte verwenden Sie nur Zubehör des Lieferanten.
- Bitte stehen, sitzen oder hüpfen sie nicht auf der Fußstütze, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Um Schäden zu vermeiden oder sich selbst zu verletzen, versuchen Sie nicht, auf Arm- oder Rückenlehne zu sitzen.
- Bitte halten Sie Ihren Massagesessel regelmäßig sauber und vermeiden Sie dabei das Einfallen von Fremdkörpern in die Ritzen des Massagesessels.
- Bitte vermeiden Sie direktes Ziehen am Stromkabel Ihres Massagesessels.
- Bitte stellen Sie bei der Verstellung von Fußstütze oder Rückenlehne sicher, dass darunter keine anderen Objekte befinden, insbesondere keine Kinder.
- Das Produkt ist ausschließlich für den Heimgebrauch vorgesehen.
- Bei Beschädigung des flexiblen Stromkabels muss ein dafür vorgesehenes flexibles Kabel verwendet werden oder vom Hersteller oder dessen Wartungsstelle ein dafür vorgesehenes flexibles Kabel zum Austausch erworben werden.


KONTRAINDIKATIONEN

Falls Sie nicht sicher sind, ob Sie den Massagesessel benutzen dürfen, konsultieren Sie in jedem Fall Ihren Arzt.

- Massagen während der Schwangerschaft oder bei einer/mehreren der folgenden Beschwerden im Massagebereich sind untersagt:
Frische Verletzungen, thrombotische Erkrankungen, Entzündungen und Schwellungen aller Art, sowie Krebs. Während der Behandlung von Gebrechen und Leiden ist vor einer Massage die Absprache mit Ihrem Arzt zu empfehlen.
- Personen mit Beeinträchtigung von Körper, Wahrnehmung oder Psyche oder Personen mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis – ist die Benutzung des Massagesessels nur unter Aufsicht und Anleitung durch die für Ihre Sicherheit verantwortliche Personen zulässig.
- Um Unannehmlichkeiten oder Gefährdungen durch die Benutzung des Massagesessels zu vermeiden, bitten wir die folgenden Personen vor der Benutzung um Konsultation eines Arztes:
 - Ruhebedürftige Personen
 - In medizinischer Behandlung befindliche Personen
 - Rückenpatienten, Personen mit Wirbelsäulenproblemen oder -verbiegungen
 - Personen mit Herzschrittmachern
- Bei Schmerzempfindungen während der Massage beenden Sie die Anwendung bitte unverzüglich.
- Bei Verletzungen während der Anwendung begeben Sie sich bitte unverzüglich in ärztliche Behandlung.
- Massieren Sie bitte keine geröteten, geschwollenen oder entzündeten Hautstellen.
- Dieser Massagesessel dient nur Ihrer heimischen Wellness-Massage, ist kein medizinisches Massageprodukt und kann daher eine medizinische Fachbehandlung nicht ersetzen.
- Wir empfehlen Ihnen eine tägliche Anwendung durch den Massagesessels von 30 Minuten. An gleicher Körperstelle sollten Sie höchstens 15 Minuten massieren, da ansonsten eine entgegengesetzte Wirkung auf Grund übermäßiger Massage eintreten kann.
- Diese Produkt ist für Kinder unter 12 Jahren nicht geeignet.
- Kinder sind zu beaufsichtigen. Stellen Sie sicher, dass Kinder den Massagesessel nicht zum Spielen benutzen.


AUFBAU

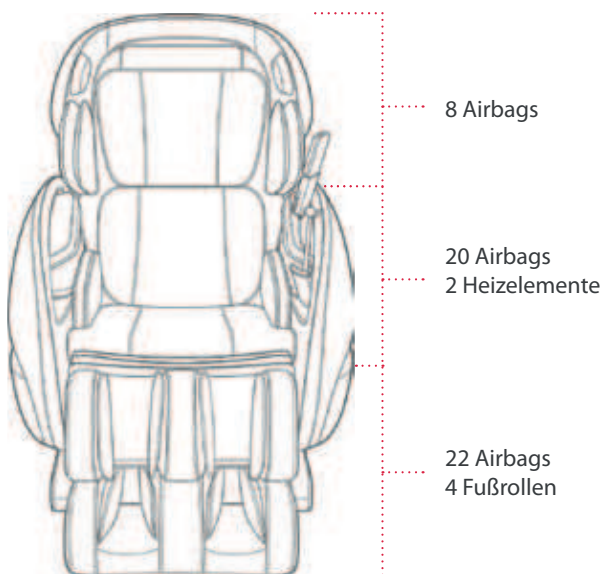

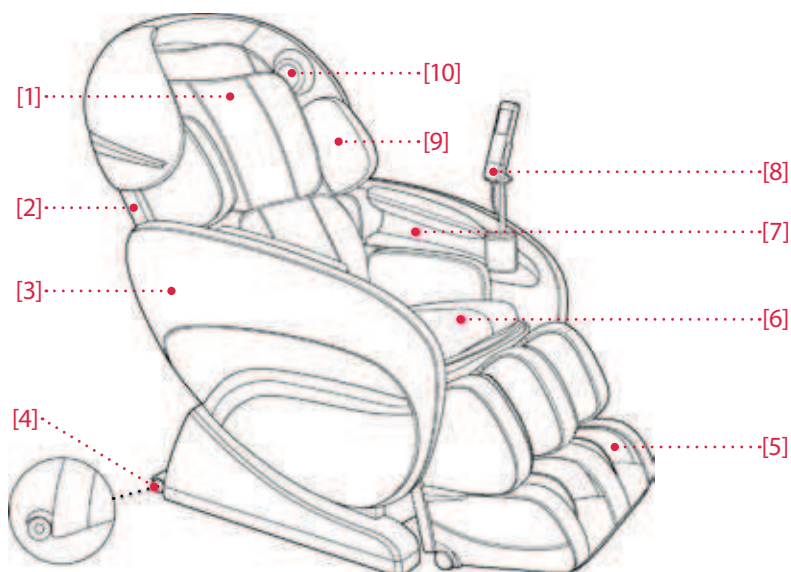

- | | | |
|------------------|-------------------|--------------------|
| [1] Nackenkissen | [5] Fußteil | [9] Schulterkissen |
| [2] Rückenlehne | [6] Sitzkissen | [10] Lautsprecher |
| [3] Seitenteil | [7] Handauflage | |
| [4] Rollen | [8] Fernbedienung | |

- Wenn Sie den Sessel aufstellen, achten Sie bitte darauf, dass hinter dem Sessel genug Platz ist, um die volle Liegeposition zu erreichen.
- Legen Sie bei empfindlichen Fußböden eine Unterlage unter den Sessel, um Beschädigungen zu vermeiden.

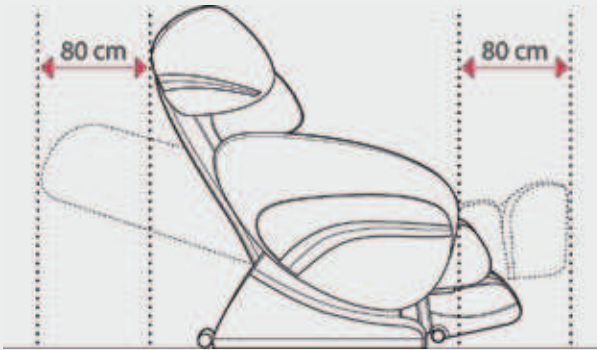

Hinweis:

- Achten Sie darauf, dass der Sessel während des Aufbaus vom Strom-netz getrennt ist.
- Die zusammen gehörenden Luftschläuche sind farblich gekennzeichnet.

01. DEN SESSEL AUSPACKEN


- Nehmen Sie den Sessel und die Seitenteile aus dem Karton.

Hinweis:

Für die Montage des Sessels immer eine weitere Personen hinzuziehen.

02. LUFTSCHLÄUCHE VERBINDEN

- Verbinden Sie die Luftschläuche am Seitenteile, mit denen am Sitzteil. (Siehe Skizze)

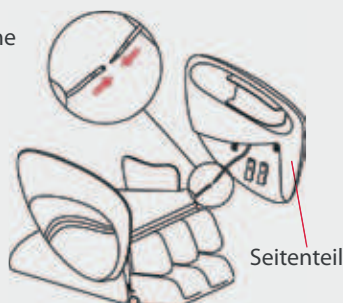


03. SEITENTEILE VERBINDEN

- Stecken Sie die Armlehnen in einem Winkel von 90° in den Sessel. Schieben Sie dazu die Befestigungsbügel (D) ganz in die Querstange (C). (siehe Skizze)



- Justieren Sie die Löcher (A) in den Seitenteilen parallel zu der Fassung, um diese am Rahmen festzuschrauben. (siehe Skizze)

Hinweis: Achten Sie auf eine sorgfältige Installation um Kratzer zu vermeiden.

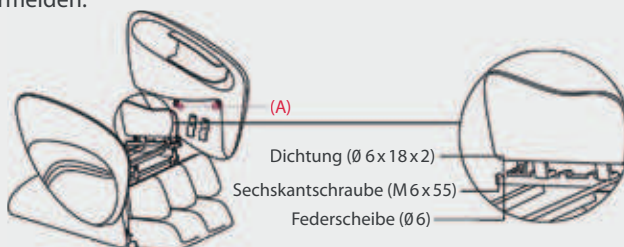


04.

- Wiederholen Sie Schritt 2 und Schritt 3 für die Installation des anderen Seitenteils.


05. BEFESTIGEN DER FERNBEDIENUNG

- Befestigen Sie die Steuereinheit an der dafür vorgesehenen Position und ziehen Sie die Schrauben fest. (siehe Skizze)

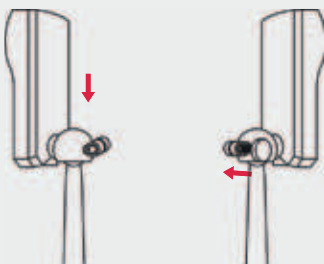

06.

- Schneiden Sie den Kabelbinder, der den Stopper mit der Rückenlehne verbindet, ab und entfernen Sie das Verpackungsmaterial vom Bedienteil der Rückenlehne (beide befinden sich unter dem Sitzpolster).

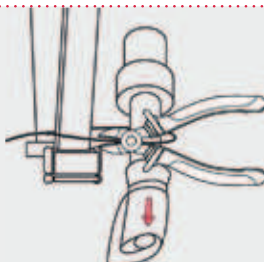


07. ANBRINGEN DER RÜCKENLEHNE

- Heben Sie die Rückenlehne an und lassen Sie diese in die Sitzhalterungen sinken. Verriegeln Sie die Flachkopfschrauben (A) auf beiden Seiten (B) des Sessels. (siehe Skizze)

A. Flachkopfschraube (am Rückenteil)

B. Halterung (am Sitz)

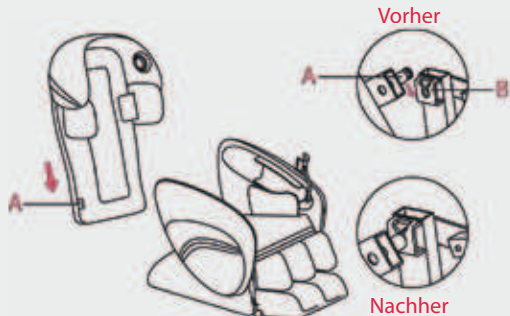

08.


- Bringen Sie die Flachkopfniete an der Verbindungsstange und der Stützgabel in der Rückenlehne an und befestigen Sie beides mit einem Splint. Verbinden Sie das Kabel, welches vom Rückenteil ausgeht, mit dem vom Sitzteil. (siehe Skizze)

A. Verbindungsstange (an der Rückenlehne)

B. Stützgabel (am Sitz)


C. Flachkopfniete

D. Splint

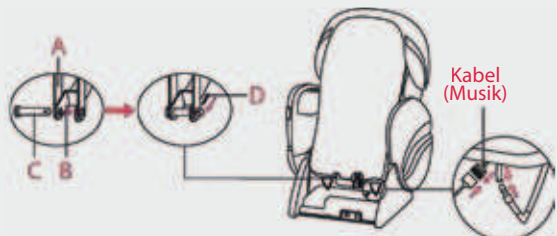

09.

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial von den Anschlüssen und schließen Sie die Stecker entsprechend der Markierungen an die jeweilige Stelle im Sitz an. (siehe Skizze)

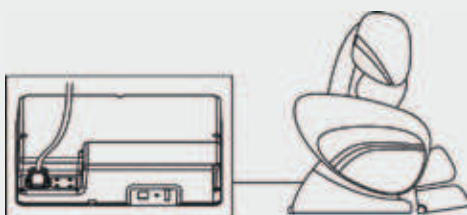


10. BEFESTIGEN DER RÜCKEN- UND SITZPOLSTER

1. Befestigen Sie das Rückenpolster mit Hilfe des Klett- und Reißverschlusses an der Rückenlehne.
2. Befestigen Sie das Nackenkissen mit dem Klettverschluss an der Rückenlehne.



11. RÜCKENPOLSTER

- Ein separates Rückenpolster zum abdämpfen der Massage ist bereits im Rückenteil eingefügt. Sollten Sie eine stärkere Massage bevorzugen, entfernen Sie dieses vorher.

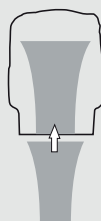

AUFBAU

12. BEWEGEN UND VERSCHIEBEN DES SESSELS

- Heben Sie das Fußteil hoch.
- Heben Sie den Stuhl um 45° an, um ihn dann mit Hilfe der Rollen am hinteren Teil bewegen zu können.




- Bewegen Sie den Stuhl niemals wenn jemand darin sitzt.
- Legen Sie bei empfindlichen Fußböden eine Unterlage unter den Sessel, um Beschädigungen zu vermeiden.

INBETRIEBNAHME

ANSCHLIESSEN DER KABEL

- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme den Netzstecker. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Sessel (A) und stecken Sie anschließend den Netzstecker in die Steckdose. Schalten Sie nun den Sessel ein, indem Sie die den Schalter auf „I“ stellen (B).

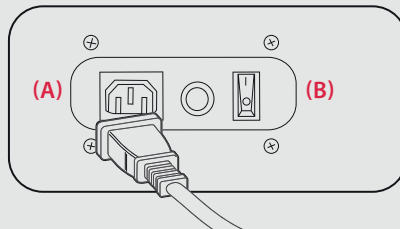

TECHNISCHE DATEN

Maße aufrecht: 145 x 91 x 132 cm
Maße liegend: 187 x 91 x 94 cm
Gewicht: 115 kg
Spannung: AC 220-240 V ~ 50/60 Hz
Nennleistung: 300 W
Laufzeit:
 Automatisch: 15 minutes
 Manuell: 30 minutes
Farbe: Creme or Black
Zertifikate:



EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Entspricht den europäischen Richtlinien 2006/95/EC.

AUSSTATTUNG / FUNKTIONEN

Der Kennedy IV ist die perfekte Kombination aus innovativer Technologie, exklusivem Design und einem Soundsystem. Gut durchdachte Massageprogramme sowie die Zero Gravity Funktion aus der Raumfahrt zur Entlastung der Wirbelsäule machen ihn zu einem zuverlässigen und attraktiven Partner.

Mit der Akkupressurmassage an Rücken-, Sitz-, Waden- und Fußbereich kommen Sie in den Genuss einer auf Ihren Körper abgestimmten, individuellen Massage. Dank der innovativen 3D Massagetechnik ist eine Massage vom Nacken bis hin zum Steißbein garantiert. Ein Massagesessel der keine Wünsche offen lässt und Ihnen die Entspannung schenkt die Sie verdient haben.



AUSSTATTUNG / FUNKTIONEN

Der Massagesessel hat eine speziell auf die menschliche Wirbelsäule abgestimmte Massagereinheit.

Die Massagerollen verfügen über einen Verriegelungsmechanismus, welcher die Wirkung der Akupressur-Punkt Massage bestärkt.

Das eigens angepasste Rückenteil des Massagesessels ist von 115° bis 160° automatisch verstellbar. Gleichmaßen lässt sich die Fußstütze von 0° bis 90° verstellen.

Mit der Zeitfunktion können Sie nach Belieben die gewünschte Dauer der Massage einstellen.

Die LCD Anzeige leuchtet im Dunkeln und gewährt Ihnen somit jederzeit die Möglichkeit die verschiedenen Programme zu bedienen.

Nach 15 Minuten schaltet sich der Massagebetrieb selbstständig ab. Um die Lebensdauer der Motoren zu erhöhen, schalten Sie die Massageköpfe erst wieder ein, wenn mindestens 30 Minuten vergangen sind. So haben die Motoren Zeit wieder abzukühlen.

Auch Ihrem Körper sollten Sie eine solche Ruhepause gönnen. Wir empfehlen Ihnen, die Massage nur maximal dreimal am Tag durchzuführen, um auch die Muskulatur nicht zu stark zu beanspruchen.

Zu Ihrer Sicherheit statten wir alle Geräte mit einem Überhitzungsschutz aus. Unter starker Belastung und hohem Anpressdruck entsteht Wärme in den Motoren. Bevor dies zu einer Gefahrenquelle werden kann, schalten sich die Geräte automatisch aus und lassen sich auch erst nach einer angemessenen Wartezeit, die zwischen 30 und 50 Minuten liegt, wieder einschalten.



FERNBEDIENUNG



[1] START/STOP

Mit dieser Taste schalten Sie die Steuereinheit ein – die Kontrolllampen blinken, der Sessel befindet sich jetzt im Leerlauf. Zum Starten wählen Sie eine beliebige Massagefunktion aus. Die Zeitschaltuhr startet automatisch eine 15 minütige Laufzeit. Um die Massage zu stoppen drücken Sie diese Taste erneut. Die Massageköpfe fahren dann automatisch in die Ausgangsposition zurück.

[2] TIMER

Ist eine Funktion ausgewählt, beträgt die Laufzeit automatisch 15 Minuten. Durch drücken der Timer Taste ändern Sie die Intervalle "20>25>30>5>10>15>20" Minuten.

Hinweis:

Um die Signaltöne auszuschalten halten Sie die Timer Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Töne zu aktivieren drücken Sie die Taste erneut 5 Sekunden lang.

[3] ZERO-G

Mit dieser Taste fahren Sie den Massagesessel in eine vollständige Liegeposition. Füße und Kopf befinden sich in einer Linie. Die Massage ist so am Stärksten, da nun das ganze Körpergewicht auf den Massageeinheiten ruht.

Hinweis:

Die ZERO-G Funktion ist nicht mit den automatischen Programmen Slumber und Thai kombinierbar.

[4] PAUSE

Während der Massage können Sie das Programm jederzeit mit der PAUSE-Taste kurz unterbrechen. Gleichzeitig stoppt die Zeitschaltuhr und die LCD Anzeige blinkt. Der Massagesessel befindet sich in dieser Zeit im Leerlauf, nur die Liegeposition und das Fußteil lassen sich verstellen. Um die Massage fortzusetzen betätigen Sie die PAUSE-Taste erneut.

[5] FUSSTEIL

Winkelanpassung Fußteil

Durch Drücken dieser Tasten können Sie den Winkel des Fußteils optimal einstellen. Haben Sie die gewünschte Position erreicht, betätigen Sie erneut die Taste um den Vorgang zu stoppen.

Längen Anpassung Fußteil

Durch gedrückt halten dieser Tasten stellen Sie das Fußteil auf Ihre jeweilige Körpergröße ein. (Bei der Auswahl eines Automatik Programms passt sich das Fußteil Ihrer Körperlänge voll automatisch an.)

[6] LIEGEPOSITION

Mit diesen Tasten können Sie die jeweils gewünschte Liege- bzw. Sitzposition auswählen.

[7] MASSAGEKÖPFE POSITIONIEREN

Die Position der Massageköpfe können Sie über die Tasten ▲ / ▼ variieren. Für noch mehr Komfort während der Massage kann der Anwender weitere Anpassungen in der Höhe der Massage durch Drücken dieser Tasten nach dem Scan-Programm vornehmen. Die Massagerollen bewegen sich nach oben oder unten, bis die am Besten geeignete Position erreicht ist und Sie die Taste loslassen.

[8] 3D EINSTELLUNG

Über diese Tasten regulieren Sie den Druckpunkt der Massageköpfe. Drücken Sie „+“, um die Massageköpfe rauszufahren und „-“, um die Massageköpfe einzufahren.

AUTOMATISCHE PROGRAMME FÜR DEN GESAMTEN RÜCKEN

Wenn Sie eines der 10 automatischen Programme starten, beginnt der „Auto Scan“ Ihre Körperstruktur abzutasten. Währenddessen haben Sie die Möglichkeit, alle Größeneinstellungen manuell vorzunehmen und den Massagesessel auf Ihre Bedürfnisse einzustellen.

[9] REFRESH [10] SLUMBER [11] BALINESE [12] DEEP TISSUE [13] THAI
[14] CALM [15] RECOVERY [16] CHINESE [17] SHOULDER [18] LUMBAR

Hinweis:

FERNBEDIENUNG

Die Programme SLUMBAR und THAI sind für ältere Menschen nicht geeignet.

[19] REFLEXZONENMASSAGE IM FUSSBEREICH

Mit dieser Taste starten bzw. stoppen Sie die Reflexzonenmassage im Fußbereich.

Hinweis:

Während der Automatischen Programme kann die Rollenmassage aktiviert oder deaktiviert werden.

[20] VIBRATION

Mit dieser Taste starten bzw. stoppen Sie die Vibrationsmassage im Sitzbereich.

Hinweis:

Während der Automatischen Programme kann die Vibration aktiviert oder deaktiviert werden.

[21] HEAT

Mit dieser Taste aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Wärme im Lendenbereich.

Hinweis:

Während der Automatischen Programme kann die Wärme aktiviert oder deaktiviert werden.

PARTIELLE / MANUELLE MASSAGE

[22] | [23] KNEADING MODUS 1, 2 | SWEDISH MODUS 1, 2

Durch einmaliges drücken dieser Taste aktivieren Sie die KNEADING Funktion Modus 1, durch erneutes drücken KNEADING Modus 2. Drücken Sie die Taste ein drittes mal, stoppt die KNEADING Funktion und wechselt in den SWEDISH Modus 1. Um in den SWEDISH Modus 2 zu gelangen drücken Sie erneut die Taste.

[24] | [25] TAPPING 1, 2 | SHIATSU 1, 2

Durch einmaliges drücken dieser Taste aktivieren Sie die TAPPING Funktion Modus 1, durch erneutes drücken TAPPING Modus 2. Drücken Sie die Taste ein drittes mal, stoppt die TAPPING Funktion und wechselt in den SHIATSU Modus 1. Um in den SHIATSU Modus 2 zu gelangen drücken Sie erneut die Taste.

[26] | [27] CLAPPING 1, 2 | ROLLING 1

Durch einmaliges drücken dieser Taste aktivieren Sie die CLAPPING Funktion Modus 1, durch erneutes drücken CLAPPING Modus 2. Drücken Sie die Taste ein drittes mal, stoppt die CLAPPING Funktion und wechselt in den ROLLING Modus 1.

Hinweis:

Diese Funktion kann nicht mit der Spot Funktion kombiniert werden.

[28] DEHNEN

Drücken Sie diese Taste um die Dehn-Funktion zu starten. Um die Massage zu beenden drücken Sie erneut die Taste. Sie können den Abstand (WIDTH) der Massagerollen in jeweils 3 Stufen einstellen. (Schmal > Mittel > Breit)

[29] SPOT/PARTIAL

Durch einmaliges Drücken der Taste aktivieren Sie die Spot Massage. Durch erneutes Drücken wechseln Sie zur partiellen Massage.

Mit diesen Tasten ▲/▼ können Sie die Massagerollen während der punktuellen bzw. partiellen Massage an dem gewünschten Rückenabschnitt positionieren.

Hinweis:

Mit der partiellen Funktion können Sie verschiedene Abschnitte in einem Bereich von ca. 8 cm massieren lassen: Nacken-, Lendenwirbel- oder Unterkörperbereich.

[30] WIDTH

Regulieren Sie den Abstand der Massagerollen während der jeweiligen Anwendungen wie, TAPPING, CLAPPING, ROLLING oder SHIATSU.

(Schmal > Mittel > Breit)

[31] SPEED

Mit dieser Taste regulieren Sie die Geschwindigkeit während der jeweiligen Anwendungen wie, TAPPING, CLAPPING, SWEDISH oder SHIATSU.

(Level 1 > Level 2 > Level 3 > Level 4 > Level 5)

[32] STRENGTH

Starten/Stoppen der Kneading Funktion. Hierbei können Sie die Massagestärke in 5 Stufen einstellen. Diese Funktion kann kombiniert werden mit TAPPING, CLAPPING und SHIATSU.

EINSTELLUNGEN LUFTDRUCKMASSAGE

[33] INTENSITÄT

Mit dieser Taste können Sie die verschiedenen Intensitätsstufen der Luftdruckfunktion einstellen. (Level 1 > Level 2 > Level 3 > Level 4 > Level 5)

[34] KOMPRESSIONSMASSAGE (GANZER KÖRPER)

Mit dieser Taste starten bzw. stoppen Sie die Kompressionsmassage am ganzen Körperbereich.

[35] SCHULTERN

Mit dieser Taste starten bzw. stoppen Sie die Kompressionsmassage im Schulterbereich.

[36] RÜCKEN- UND SITZBEREICH

Mit dieser Taste starten bzw. stoppen Sie die Kompressionsmassage im Rücken- und Sitzbereich.

[37] ARME

Mit dieser Taste starten bzw. stoppen Sie die Kompressionsmassage im Arm- und Bereich.

[38] WADEN

Mit dieser Taste starten bzw. stoppen Sie die Kompressionsmassage im Wadenbereich.

MASSAGETECHNIKEN

Mit den verschiedenen Programmen simuliert der Sessel die Techniken einer traditionellen Handmassage:



ROLLING

Das ROLLING ist eine angenehme Abwechslung zwischen Spannung und Lösung der Muskulatur und wirkt daher besonders beruhigend und entspannend. Diese Technik wird häufig zum Abschluss der Massage, zur Entspannung der Muskulatur und zur Erholung angewendet.



KNEADING

Haut und Muskulatur werden entweder zwischen Daumen und Zeigefinger oder mit beiden Händen gefasst und geknetet. Diese Massagetechnik wird vor allem zum Lösen von Verspannungen verwendet.



KOMPRESSION

Auf- und abschwellige Luftkissen bewirken eine pumpende Bewegung, die natürliche Muskelreflexe erzeugt. Besonders wohltuend auch im Waden- und Fußbereich.



HEATING

Eine tiefenwirksame und wärmeausstrahlende Wirkung bei der man perfekt entspannen kann. Durch die tief reichende Wirkung ist diese Funktion besonders wohltuend bei Muskelverspannungen.



VIBRATION

Die Vibration versetzt ganze Körperregionen in gleichmäßige Schwingungen die sich bis in die Tiefe fortsetzen. Anregend für den Kreislauf, wärmend und entspannend für die Muskulatur.



TAPPING

Beim TAPPING werden mit der Handkante, der flachen Hand oder der Faust kurze klopfende Bewegungen ausgeführt. Dies fördert die Durchblutung der Haut und erweicht die angespannte der Muskulatur. Wird das TAPPING auf höhe der Lunge durchgeführt verbessert dies die Schleimlösung in der Lunge.



CLAPPING

Beim CLAPPING wird durch leichtes Klopfen mit der hohlen Hand die Durchblutung der Muskulatur in der Tiefe gefördert. Gleichzeitig regt diese Massagetechnik das Nervensystem an. Das CLAPPING vermindert Spannungen und fördert die Straffung des Bindegewebes. Diese sanfte Massageart regt den Organismus an.

SHIATSU

SHIATSU (Fingerdruck) ist eine in Japan entwickelte Form der Körpertherapie. Die Massagetechnik besteht aus sanften rhythmischen tiefer wirkenden Dehnungen und Rotationen. Shiatsu hat das Ziel, einzelne Punkte am Körper zu stimulieren und die Muskulatur zu mobilisieren.

SWEDISH

Ist eine Kombination aus TAPPING und CLAPPING.

MUSIC

Zusätzlich entspannen und genießen mit der Musikfunktion.

STÖRUNGSSUCHE

Störung	Behebung
Der Sessel ist am Stromnetz angeschlossen, aber weder Sessel noch Fernbedienung funktionieren.	• Kontrollieren Sie die Verbindung vom Stromkabel • Vergewissern Sie sich, dass der Schalter am Sessel auf „I“ steht.
Die Fernbedienung funktioniert, aber der Sessel reagiert nicht.	• Bei zu langem Gebrauch kann der Sessel überhitzen. Schalten Sie ihn aus und lassen Sie ihn 30-50 Minuten abkühlen.

PFLEGEHINWEISE

Sie haben ein aus hochwertigen Materialien hergestelltes Produkt erworben. Das erfordert eine entsprechende Pflege. Behandeln Sie die Oberflächen regelmäßig mit empfohlenen Pflegeprodukten, damit Sie lange Freude an Ihrem Sessel haben. Fragen Sie Ihren Händler nach Kunstleder- und Lederpflegeprodukten.

LAGERUNG

1. Empfohlene Lagerung: Trocken, staubfrei. Bitte Kabel aufwickeln.
2. Nicht neben einer Heizung oder offenen Flamme lagern. Nicht der unmittelbaren Sonne aussetzen.

GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN

Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit. Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen. Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile wie z.B. Stoffabdeckungen. Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Gewährleistungszeit.

Der Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, dieser z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist.

Die Gewährleistung vom Händler beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Gewährleistung übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und/oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstanden sind.

Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Hersteller heraus, dass das Gewährleistungsverlangen einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
tel. (+49) (0 52 54) 9 30 98 - 0
fax (+49) (0 52 54) 9 30 98 - 30
info@casada.com
www.casada.com



Copyright Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von CASADA International GmbH und dürfen ohne ausdrückliche Bestätigung nicht weiterverwendet werden.

Copyright (c) 2013 CASADA International GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.