

< relaxmyway

SCOOP





since
2000

< relaxmyway

Seit der Gründung im Jahr 2000 steht der Name CASADA für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und Fitness.

Heute sind CASADA-Produkte in weltweit 37 Ländern erhältlich. Kontinuierliche Weiterentwicklung, unverwechselbares Design und die strikte Ausrichtung auf eine Verbesserung der Lebensqualität zeichnen die CASADA-Produkte ebenso aus, wie die zuverlässige und hervorragende Qualität.



Wir gratulieren

Mit dem Kauf dieses Massagegerätes haben Sie Gesundheitsbewusstsein bewiesen.

Damit Sie lange Zeit die Vorzüge dieses Gerätes nutzen können, möchten wir Sie bitten, die Sicherheitshinweise aufmerksam zu lesen und zu beachten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem persönlichen Scoop.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	4
Ausstattung / Funktionen.....	6
Eigenschaften.....	7
Technische Daten	7
Lieferumfang.....	7
Bedienung.....	8
Reinigung und Pflege.....	10
Lagerung.....	10
Störungssuche	10
EU – Konformitätserklärung.....	11
Gewährleistungsbestimmungen.....	11

Sicherheitshinweise



Bevor Sie dieses Massagegerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die folgenden Hinweise sehr sorgfältig, um die einwandfreie Funktion und optimale Wirkungsweise zu gewährleisten. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgsam auf!

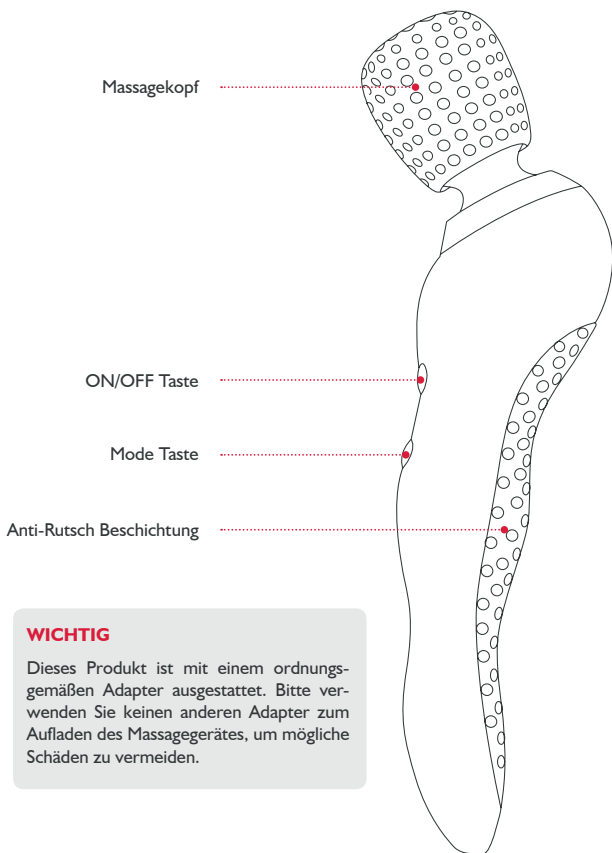
- Verwenden Sie NUR die mitgelieferten und intakten Kabel. Fremde sowie beschädigte Kabel und Stecker können zu Stromschlägen, Versagen des Gerätes oder zum Brandausbruch führen.
- Um Unfälle zu vermeiden, lassen Sie keine Fremdkörper in den Freiraum zwischen den Massagekopf und das Gehäuse gelangen.
- Zur Vermeidung von Kurzschlüssen und Unfällen meiden Sie den direkten Kontakt des Gerätes mit Wasser und hohen Temperaturen.
- Bitte schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung aus, um Beschädigung oder Verletzungen zu vermeiden.
- Berühren Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen.
- Ziehen und Rütteln Sie nicht mit grober Gewalt an dem Kabel während des Ladevorgangs.
- Das Kabel darf nicht beschädigt und der Schaltkreis des Geräts nicht verändert werden.
- Verwenden Sie keine Ersatzteile oder anderes Zubehör, als den hier empfohlenen.
- Um Verletzungen zu vermeiden, bedienen Sie das Gerät nie mit grober Gewalt.
- Benutzen Sie das Gerät erst eine Stunde nach einer Mahlzeit.
- Sollten Sie während der Anwendung etwas Ungewöhnliches am Gerät bemerken, konsultieren sie bitte den autorisierten Fachhandel.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen (einschließlich Kinder unter 14 Jahren) geeignet, es sei denn, sie werden beaufsichtigt und durch eine verantwortliche Person in den Gebrauch eingewiesen.
- Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät kein Kinderspielzeug ist.
- Wenn das Netzteil beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder autorisierten Fachhandel ersetzt werden.

Sicherheitshinweise

Folgende Personen sollten das Gerät erst nach Absprache mit dem Arzt verwenden:

- Personen, die leicht von elektromagnetischen Wellen beeinflusst werden, wie Nutzer von Herzschrittmachern oder vergleichbaren Geräten.
- Personen, die unter einem malignen Tumor leiden.
- Personen mit Herzkrankheiten.
- Frauen während der Menstruation, direkt nach der Geburt und während der Schwangerschaft.
- Personen, die unter Diabetes leiden und dadurch eine eingeschränkte Sensorik haben.
- Personen mit Hautverletzungen in dem zu massierenden Bereich.
- Personen mit Körpertemperatur über 38°C (Fieber).
- Personen mit akuten Entzündungen/Verletzungen im fortgeschrittenen Stadium (mit Symptomen wie Müdigkeit, Schüttelfrost, unbeständigem Blutdruck, usw.)
- Personen, die unter großer Erschöpfung leiden.
- Personen, die unter Osteoporose, Prellungen oder Muskelzerrungen, Frakturen usw. leiden.
- Personen, die schmerz- und hitzeempfindlich sind.
- Personen, die ihre Beine und Füße nicht bewusst bewegen können.
- Personen, die nicht fähig sind, ihre Gedanken klar auszudrücken und Personen, die keine oder nur beschränkte Bewegungen ausführen können, sollten das Gerät nicht benutzen.
- Personen, denen vom Arzt eine Massage verboten wurde, wird von der Benutzung abgeraten.
- Personen mit Thrombose, schwerwiegendem Aneurysma, akutem venösem Aneurysma, allen Arten von Hautausschlägen und Hautkrankheiten usw.

Ausstattung / Funktionen



WICHTIG

Dieses Produkt ist mit einem ordnungsgemäßen Adapter ausgestattet. Bitte verwenden Sie keinen anderen Adapter zum Aufladen des Massagegerätes, um mögliche Schäden zu vermeiden.

Eigenschaften

Besonderheiten



Vibration



Automatik



Kabellos

Massagebereiche

Nacken, Rücken, Taille sowie andere zur Massage geeigneten Körperbereiche

Sonderfunktionen

portables Massagegerät
Tastensperre-Funktion
flexibler Massagekopf



Technische Daten

Massagegerät	SCOOP
Produktmaße	272 x 59 x 89 mm
Produktgewicht	0,35 kg
Spannung Adapter	
Eingang	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
Ausgang	DC 5.0 V, 1500 mA
Spannung Gerät	Batterie: Lithium-Akku 3.7 V, 2200 mAh
Nennleistung	6 W
Automatische Laufzeit	5 Minuten
Zertifikate	

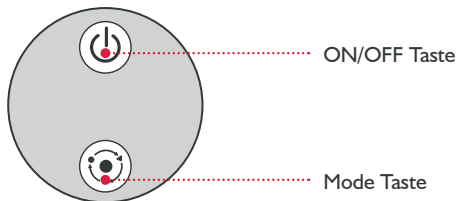


Lieferumfang

- Massagegerät
- Kabel mit USB-Anschluss



Bedienung



ON/OFF TASTE

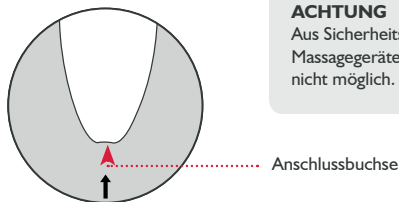
Bei kurzem Drücken dieser Taste schalten Sie das Massagegerät ein. Sobald es eingeschaltet ist, leuchtet die Kontrollleuchte blau und das Massagegerät läuft in der niedrigsten Vibrationsstufe. Zum Abschalten des Massagegerätes betätigen Sie die Taste wieder kurz. Die blaue Kontrollleuchte erlischt, das Gerät ist abgeschaltet.

MODE TASTE

Wenn das Massagegerät eingeschaltet ist leuchtet die Kontrolllampe blau. Um zwischen den 5 Automatik-Modi zu wechseln, drücken Sie kurz die Mode Taste. Die Kontrollleuchte leuchtet kurz auf, um den Moduswechsel zu bestätigen.

AUFLADEN

Stecken Sie den Ladeadapter in eine Steckdose und verbinden Sie ihn mit dem Massagegerät. Die Kontrollampe leuchtet so lange rot, bis der Akku vollständig aufgeladen ist. Bei vollständig aufgeladenem Akku leuchtet die Kontrollampe grün.



ACHTUNG

Aus Sicherheitsgründen ist die Anwendung des Massagegerätes während des Ladevorgangs nicht möglich.

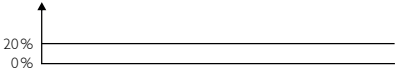
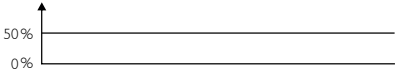
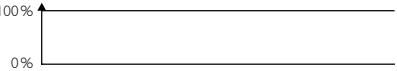
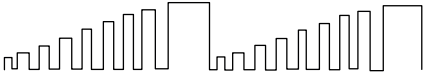
Bedienung

TASTENSPERRE

Um unbeabsichtigten Betrieb und unnötigen Energieverlust des Massagerätes zu vermeiden, kann eine Tastensperre für den Transport oder die Lagerung aktiviert werden. Hierfür halten Sie die ON/OFF und Mode Taste gleichzeitig ca. 3 Sekunden gedrückt, bis eine einmalige kurze Vibration zu spüren ist und die Kontrolllampe kurz blau aufleuchtet. Diese Tastenkombination dient sowohl zum Sperren als auch Entsperren.

ACHTUNG

Im Auslieferungszustand ist die Tastensperre aktiviert. Bitte entsperren Sie das Gerät vor dem Gebrauch.

Automatik- Programm	Geschwindigkeit / Vibration
Mode 1	 A graph showing a constant speed/vibration level of 20% over time. The y-axis is labeled with 0% and 20%.
Mode 2	 A graph showing a constant speed/vibration level of 50% over time. The y-axis is labeled with 0% and 50%.
Mode 3	 A graph showing a constant speed/vibration level of 100% over time. The y-axis is labeled with 0% and 100%.
Mode 4	 A graph showing a series of pulses of increasing amplitude, followed by a series of pulses of decreasing amplitude.
Mode 5	 A graph showing a series of pulses of varying amplitude, including some high-frequency bursts.

Reinigung und Pflege

Verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel mit niedriger Konzentration und ein weiches Tuch. Reiben Sie damit die Oberfläche ab und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.

Achten Sie bitte auf geringe Feuchtigkeit und benutzen Sie keine scharfen Bürsten oder Reinigungsmittel!

Lagerung

Lagern Sie das Massagegerät an einem trockenen und kühlen Ort. Vermeiden Sie bei der Lagerung übermäßiges Erhitzen durch direkte Sonneneinstrahlung sowie zu hohe Luftfeuchtigkeit.

Störungssuche

Zustand	Ursache	Lösung
Gerät lässt sich nicht einschalten.	a) Akku ist in einem niedrigem Ladezustand. b) Tastensperre ist eingeschaltet.	a) Laden Sie den Akku vollständig auf. b) Entfernen Sie die Tastensperre.
Gerät schaltet sich während der Anwendung ab.	a) Die Akkuleistung ist zu schwach. b) Automatikprogramm von 5 Minuten ist vorbei.	a) Laden Sie den Akku vollständig auf. b) Starten Sie das Programm neu.
Das Gerät macht Geräusche.	Dieses Geräusch geht von dem arbeitenden Motor der Mechanik aus.	Dieses Geräusch ist normal und weist nicht auf eine Fehlfunktion hin.

EU-Konformitätserklärung

Entspricht den europäischen Richtlinien EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

Gewährleistungsbestimmungen

Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit. Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nach zuweisen.

Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile. Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Gewährleistungszeit.

Der Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, dieser z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist.

Die vom Verkäufer gewährte Gewährleistung beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Gewährleistung übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und/oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstehen.

Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Verkäufer heraus, dass das Gewährleistungsverlangen einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.



Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com | www.casada.com



Copyright Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von CASADA International GmbH und dürfen ohne ausdrückliche Bestätigung nicht weiterverwendet werden.

Copyright ©2017 CASADA International GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.