

Medical


Hygienemaske/

OP-Maske (MNS)

high quality



Anwendungs-
empfehlung

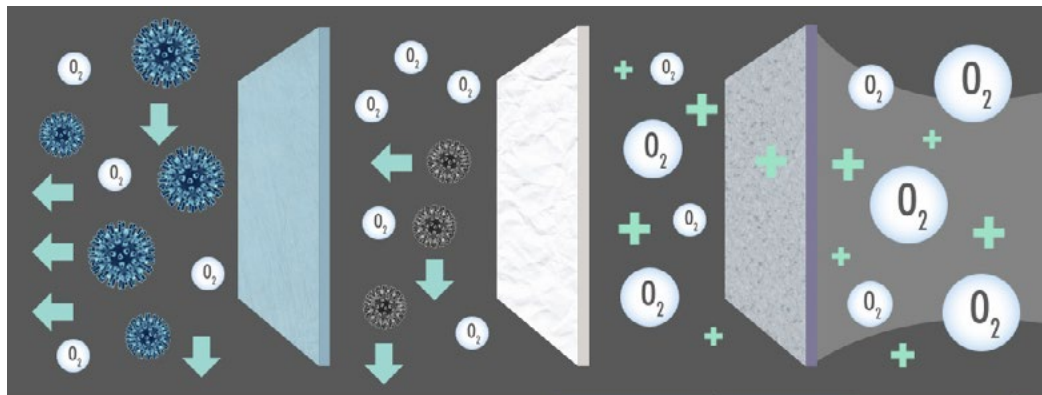

3-lagiger Schutz



Hautfreundliches Stoffgewebe:
Berührt direkt Ihr Gesicht und bietet Ihnen ein angenehmes Tragegefühl

Antibakterielle Schicht:
Hält die meisten Staub- und Pollenbakterien außerhalb der Maske

Filterschicht:
Filtert Viren, Bakterien und Partikel

INNEN

AUSSEN



Leichte Abweichung in Form und Farbe des Artikels möglich

Anwendungsempfehlung zur Hygienemaske

Wie Sie die Medical Hygienemasken / OP-Masken (MNS) von Casada richtig anwenden!

1.
Stellen Sie sicher, dass Sie die Hände sauber und desinfiziert haben, bevor Sie eine Maske aus der Packung nehmen.
2.
Die Maske muss Ihren Mund und Nasenbereich sicher und vollständig abdecken und seitlich dicht am Gesicht anliegen. Befestigen Sie diese mit den vorgesehenen elastischen Ohrschlaufen.
3.
Vermeiden Sie die Hygienemaske während des Tragens zu berühren.
4.
Feuchte und beschmutzte OP-Masken müssen Sie umgehend wechseln. Dabei die ersten Schritte wiederholen und die allgemeinen 5 Schritte zur Handdesinfektion beachten (man sollte die Maske ungefähr alle 2 Stunden wechseln).
5.
Jede Maske bitte nur einmal nutzen und nicht aufbewahren! Nach dem Gebrauch unverzüglich, sorgsam und in einem geschlossenen Eimer entsorgen.
6.
Nach dem Ausziehen der Maske bitte die Händehygiene wieder beachten und auch desinfizieren.
7.
Ansonsten halten Sie sich an die vorgeschriebenen Anwendungsstandards Ihres Arbeitgebers oder Krankenhauses.
8.
Die Hygienemaske gewährleistet allein keinen vollständigen Schutz. Sie sollten weiterhin weitere Hygienemaßnahmen einsetzen.

Medizinische Gesichtsmasken – Erklärung der europäischen Norm 14683:2019

In erster Linie werden **Medizinische Gesichtsmasken zum Schutz von Patienten genutzt**. Die europäische Norm legt fest, dass Gesichtsmasken dem Schutz des Patienten vor ansteckenden Keimen aus Mund und Nase des Personals dienen. Ebenfalls dient sie dem Träger zu jeder Zeit als Schutz vor möglichen kontaminierten Flüssigkeiten.

Die Casada Hygienemaske erfüllt die Anforderungen der Prüfkriterien der EN 14683:2019 für medizinische Gesichtsmasken. Demnach wird bei den Masken nach zwei Typen unterschieden. Zum einen die bakterieller Filterleistung und zum anderen der Atemwiderstand. Bei jedem Typ wird zudem noch nach der Spritzfestigkeit unterschieden.

Produktklassifizierung	Typ I*	Typ II Standard / Special	Typ IIR Extra / Protection
BFE Bakterielle Filtereffizienz	≥ 95%	≥ 98	≥ 98%
Atemwiderstand (Pa/cm ²)	≤ 29,4	≤ 29,4	≤ 49,0
Widerstandsfähigkeit gegen Flüssigkeitsspritzer	nicht erforderlich	nicht erforderlich	≥ 16
Mikrobiologische Reinheit	≤ 30	≤ 30	≤ 30

*Masken des Typ I sind nicht für medizinische Personal im OP vorgesehen. Diese sind nur für Patienten und Personen gedacht, welche das Risiko einer Infektionsverbreitung vermeiden möchten, besonders bei Epidemien oder Pandemien.

Geprüft und Übereinstimmung der technischen Dokumentation gemäß den Anforderungen

Richtlinien für Medizinprodukte

DIN EN14683:2019

Klassifikation Type IIR

- ◀ **SCHICHTFILTERSYSTEM**
- ◀ **FILTERT SCHADSTOFFE AUS DER LUFT**
- ◀ **VLIESTOFF, 3-LAGIG**
- ◀ **SOFT ELASTISCHE OHRSCHLAUFEN**
- ◀ **HYPOALLERGEN**



Name: Disposable 3PLY Medical Face Mask
 Größe: 17,5*9,5 cm
 Packung: 50pcs/box
 Wirksamkeit: 2 Jahre
 Standard: BFE>98%
 Aufbewahrung: unter Verschluss an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren



Casada Deutschland GmbH
 Obermeiers Feld 3 | 33104 Paderborn
www.casada.de